



Инструкция по применению

Цемент цинкосульфатный с модифицирующими добавками для временного пломбирования зубов

Ц – ЦСФ

ТУ 9391-006-40151387-2001

Материал применяется в стоматологии для временного пломбирования зубов и покрытия лекарственного вещества в полости рта.

Флакон с материалом перед вскрытием встряхнуть.

Необходимое количество материала поместить на стеклянную пластину и смешать с дистиллированной водой в соотношении 2:1, до получения однородной консистенции.

Время замешивания 10-15 секунд

При температуре +23°C:

- рабочее время не более 45 секунд,

- время твердения не более 6 минут.

Прием пищи возможен через 2 часа.

Внимание! Беречь от влаги

Хранить при температуре +(5+30)°C в сухом защищенном от прямых солнечных лучей помещении

Срок годности – 2 года

ПРОИЗВЕДЕНО:

ООО "СТОМАДЕНТ"

140070, Московская обл., Люберецкий р-н,

п. Томилино, ул. Гаршина, 11,

Тел./факс: (495) 514-9346, тел.: (495) 514-9347, 48

www.stomadent.ru