

## Материал для защиты тканей зуба и мягких тканей полости рта светового отверждения

### ЭласДам

ТУ 32.50.11-035-40151387-2021

**Регистрационное удостоверение: № РЗН 2024/23123 от 11.07.2024 г.****Торговое название: ЭласДам**

#### СОСТАВ

Олигоуретанметакрилат, ОКМ-2, бутилированный гидрокситолуол, триметакрилаттриэтанолamina (ТМАТЭА), камфорхинон, полидиметилсилоксан, бариевоалюмоборосиликатное стекло, силан, азросил, пигменты.

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Материал «ЭласДам» (далее Материал) предназначен для защиты тканей зуба и мягких тканей полости рта при:

- проведении процедуры отбеливания зубов;
- возможных воздействиях материалов с высокой кислотностью или щелочностью при манипуляциях в полости рта.

Обеспечивает надежный хорошо видимый барьер.

#### СВОЙСТВА

Материал представляет собой однородную пасту текучей консистенции бирюзового цвета. Отверждается светом длиной волны 450+500 нм (голубой свет), расфасовывается в шприцы (контейнеры) черного цвета.

Материал обладает высокой текучестью, легко наносится на ткани полости рта, а после отверждения обладает высокой эластичностью, что позволяет легко удалить его после использования с помощью зонда.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Мягкие ткани и межзубные промежутки, подлежащие защите, тщательно промойте и просушите.

Материал нанесите на десневой край, межзубные промежутки и зоны повышенной чувствительности (оголенные шейки зуба) слоем 1,0 – 2,0 мм и шириной 3,0 – 4,0 мм, используя насадку на шприц.

Отвердите материал светом длиной волны 450+500 нм (голубой свет), последовательно перемещая световод с перекрытием области отверждения на 15%. Время отверждения каждой области 20 – 30 секунд.

Для удаления отвержденного материала аккуратно подденьте и удалите зондом.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Материал для защиты тканей зуба и мягких тканей полости рта светового отверждения «ЭласДам» по ТУ 32.50.11-035-40151387-2021 в составе:

1. Материал для защиты тканей зуба и мягких тканей полости рта светового отверждения «ЭласДам» 2 г в шприце (контейнере) – 3 шт.
2. Игла-насадка в пакете – 9 шт.
3. Вкладыш картонный - 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При соблюдении правил применения противопоказаний нет.

#### ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Материал содержит уретановые и метакриловые производные, которые могут вызвать у пациентов аллергическую реакцию.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В случае возникновения аллергической реакции у пациента прекратить использование материала.

#### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Материал может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями ГОСТ 17768-90 и правилами перевоза грузов, действующими на каждом виде транспорта. Вид отправки – почтовой посылкой, автомашинами или контейнерами для соответствующего вида транспорта. Условия транспортирования – по группе условий хранения 1.1 по ГОСТ 15150-69 в диапазонах температур + (5±25) °С.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал в упаковке предприятия – изготовителя должен храниться по ГОСТ 15150-69 в диапазонах температур +(5±24) °С, в сухом защищенном от прямых солнечных лучей помещении.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие материала всем требованиям настоящей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

#### СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок хранения (срок годности) материала устанавливается: 3 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Номер партии соответствует дате производства материала и указывается на упаковке.

#### ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Применяется в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и передвижных медицинских комплексах.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

Материал, упаковка и принадлежности, входящие в набор, не требуют специальных мер предосторожности при уничтожении.

Отходы относятся к классу опасности А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к твердым бытовым отходам) СанПин 2.1.3684-21

#### Наименование и адрес предприятия-производителя / организация, принимающая претензии



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СТОМАТОЛОГИЯ ДЕНТИСТРИ» (ООО «СТОМАДЕНТ»),  
140070, Россия, Московская область, г.о. Люберцы,  
рп. Томилино, ул. Гаршина, д. 11, стр.6, офис 301.  
Телефон/факс: +7(495) 514-93-47/48; 514-93-46.  
E-mail: info@stomadent.ru, www.stomadent.ru