



## Инструкция по применению

### Дентин

Материал для временных пломб

ТУ 9391-017-40151387-2006

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: № ФСР 2011/12469 от 20 марта 2017 г.**

**Торговое название:** «Дентин»

#### СОСТАВ

*Масло вазелиновое, ланолин безводный, полидиметилсилоксан, оксид цинка, цинк сернокислый одноводный, кальций сернокислый полугидрат, каолин, краситель тартразин.*

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Материал для временных пломб «Дентин» применяется в терапевтической стоматологии для временного закрытия полостей зубов и лекарственных препаратов на срок до 14 суток. Не содержит эвгенол.

#### СВОЙСТВА

Материал для временных пломб «Дентин» приготовлен на основе цинксульфатного цемента и минерального масла в виде пасты, выпускается с запахом мяты и без запаха.

Материал «Дентин» это однородная паста белого или кремового цвета без посторонних примесей и сухих мест, время твердения начальное не более 2 часов, окончательное не более 24 часов, плотность 2,8-3,2 г/см<sup>2</sup>.

#### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал для временных пломб «Дентин» помещают в подготовленную полость гладилкой слоем 1-2 мм. Начальное твердение пасты происходит в полости рта в течение 2-3 часов, поэтому пациенту не рекомендуется принимать пищу в этот период времени. Окончательное время твердения 24 часа.

Выводится паста из полости экскаватором или зондом. Допускается удаление временной пломбы с применением ультразвука.

Банку с пастой после взятия материала для наложения пломбы необходимо плотно закрыть крышкой, для предотвращения попадания влаги.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки материала:

1. Материал для временных пломб «Дентин» с запахом мяты в составе:

- банка с пастой - 1 шт.,
- инструкция по применению.

2. Материал для временных пломб «Дентин» без запаха в составе:

- банка с пастой - 1 шт.,
- инструкция по применению.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний нет.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать строго в соответствии с инструкцией.

#### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Материал «Дентин» в упакованном виде транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ Р 50444-92, и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующий вид транспорта. Условия транспортирования по группе условий 1, ГОСТ 15150-69, при температуре +(5÷25)°С

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал для временных пломб «Дентин» в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в условиях 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре +(5÷25)°С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении.

Избегать при хранении повышенной влажности воздуха и контакта с влагой.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие материала «Дентин» требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

#### СРОК ГОДНОСТИ

**2 года со дня изготовления.** Не применять после истечения срока годности.

#### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и передвижных комплексах.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

«Материал не требует специальных мер предосторожности при уничтожении. Утилизация проводится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса опасности А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к твердым бытовым отходам).

Обращение с отходами и их утилизация должны проводиться согласно законам РФ: «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, и «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. № 89-ФЗ.

#### Наименование и адрес предприятия-производителя / организация, принимающая претензии:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«СТОМАТОЛОГИЯ ДЕНТИСТРИ» (ООО «СТОМАДЕНТ»),**

140070, Российская Федерация,

Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гаршина, дом 11.

Телефон/факс: +7(495) 514-93-46, тел.: +7(495)514-93-47/48;

E-mail: info@stomadent.ru, [www.stomadent.ru](http://www.stomadent.ru)