



Инструкция по применению

ГЕЛЬ

для обработки зуба

ТУ 9391-002-40151387-2016

РУ № ФСР 2010/08562 от 25.04.2016

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ: № ФСР 2010/08562 от 25.04.2016

Торговое название: ГЕЛЬ для обработки зуба

СОСТАВ

Вода дистиллированная, кислота ортофосфорная, голубой пигмент, стабилизатор.

В составе геля для обработки зуба лекарственных средств и материалов живот-ного или человеческого происхождения нет.

СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ

Гель для обработки зуба предназначен для травления эмали и дентина с целью создания микроретенционных пунктов для увеличения адгезии при работе с композитными материалами.

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

Гель для обработки зуба представляет собой гель голубых тонов, содержащий 35-37% ортофосфорной кислоты.

Потенциальные потребители геля для обработки зуба - лечебные учреждения, стоматологические клиники и передвижные медицинские комплексы.

СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ

Травлению гелем подвергаются эмалевые и дентиновые стенки полости и поверхность эмали и дентина вокруг полости.

Отпрепарируйте полость согласно требованиям адгезивной техники. Промойте струей воды и высушите воздухом, не пересушивая. Для предотвращения попадания на подготовленную полость ротовой жидкости, крови можно использовать ватные валики или коффердам.

Рекомендуется техника тотального травления: эмаль протравливайте не менее 15 секунд, дентин 5-15 секунд в зависимости от показаний, затем тщательно промойте водой. Протравленную поверхность просушите воздухом, не пересушивая дентин. Правильно протравленная эмаль имеет тусклый меловой оттенок.

В случае попадания ротовой жидкости, крови или слюны на протравленную поверхность травление необходимо повторить в течение 10 секунд, после чего поверхность промывают и просушивают.

Шприц с гелем должен быть закрыт сразу после применения.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Шприц с гелем для обработки зуба - не более 4 шт.,

- игла одноразовая не более 20 шт.,

- инструкция по применению.

СВЕДЕНИЯ О РИСКАХ ПРИМЕНЕНИЯ

Гель для обработки зуба содержит 35-37% ортофосфорной кислоты. Избегайте контакта геля с кожей, слизистой оболочкой полости рта, глазами, одеждой.

При попадании геля на кожу необходимо немедленно промыть водой, а в случае попадания в глаза - промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Не допускается проглатывание!

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Гель для обработки зуба в упакованном виде транспортируется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующий вид транспорта.

Вид отправки – почтовой посылкой, автомашинами или контейнерами для соответствующего вида транспорта.

Условия транспортирования по ГОСТ 15150 при температуре + (5÷24) °С.

Хранение осуществляется в соответствии с условием хранения 1 по ГОСТ 15150. Гель для обработки зуба в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться при температуре +(5÷24) °С, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении.

СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие геля для обработки зуба всем требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ О СРОКЕ ГОДНОСТИ

Гарантийный срок годности геля для обработки зуба устанавливается 2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Шприц с гелем для обработки зуба с истекшим сроком годности или пришедшим в негодность по каким-то иным причинам подлежит нейтрализации.

Шприц с остатками геля необходимо поместить в емкость с 5% водным раствором бикарбоната натрия на 15–30 минут. После нейтрализации утилизация должна проводиться путем сбора шприцев с гелем в контейнер с последующим вывозом специализированными предприятиями. Отходы относятся к классу опасности А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к твердым бытовым отходам) СанПин 2.1.3684-21.

Наименование и адрес предприятия-производителя / организация, принимающая претензии:

ООО «СТОМАДЕНТ»

140070, Московская обл., Люберецкий р-н,
п. Томилино, ул. Гаршина, д.11.

Тел./факс: (495) 514-9346,

тел.: (495) 514-9313, (495) 514-9347, 48.

www.stomadent.ru