



Инструкция по применению

ФисСил С

Материал-герметик для закрытия углублений и фиссур зубов светового отверждения

ТУ 9391-004-40151387-98

Регистрационный номер: № ФСР 2009/05063 от 22.06.2009

Торговое название: «ФисСил С»

СОСТАВ

Уретандиметакрилат, Бис-ГМА, триэтиленгликольдиметакрилат, бутилированный гидрокситолуол, бензил, этил - парадиметиламинобензоат, камфорохинон, стеклонаполнитель аэросил, силан, кислота уксусная, диакрил, перекись бензоила, дигидроксиэтилпара-толуидин, диоксид титана.

НАЗНАЧЕНИЕ

Материал-герметик светового отверждения для закрытия углублений и фиссур зубов «ФисСил С»

предназначен для герметизации углублений и фиссур зубов и предупреждения возникновения кариеса.

СВОЙСТВА

Материал-герметик «ФисСил С» представляет собой однородную пасту (прозрачную или непрозрачную) текучей консистенции, отверждается светом длиной волны 450÷500 нм.

Глубина отверждения прозрачной и непрозрачной паст за 20 сек не менее 1,5 мм.

Материал-герметик «ФисСил С» после отверждения обладает стойкостью к истиранию и высокой адгезионной прочностью к эмали зуба. Адгезионная прочность при сдвиге отвержденного материала к эмали зуба не менее 7 МПа.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Провести очистку всей окклюзионной поверхности профилактической пастой, не содержащей фтора и масел. Тщательно промыть водой.

2. Изолировать обрабатываемую поверхность, используя коффердам или ватные валики.

3. Высушить жевательную поверхность струей воздуха не менее 30 сек. На окклюзионную поверхность обрабатываемого участка эмали нанести гель для обработки зуба, содержащий 34-37% ортофосфорной кислоты на 20÷60сек, тщательно промыть водой в течение 20÷60сек. и высушить воздухом. Протравленная поверхность эмали должна иметь меловой оттенок. Если обработанная поверхность эмали не удовлетворяет этому требованию, то необходимо повторить п.3.

Внимание! В случае попадания слюны травление повторить в течение 10 секунд, после чего промыть водой и высушить.

4. Нанести герметик на подготовленную поверхность непосредственно из шприца с помощью одноразовой иглы-насадки. Для этого необходимо снять со шприца наконечник и надеть иглу-насадку. Перед использованием необходимо убедиться в проходимости отверстия в игле, для чего надо выдавить небольшое количество материала из шприца. Убедившись в проходимости иглы-насадки, нанести герметик, начиная от края фиссуры. Распределить материал по подготовленной поверхности во время и после внесения с помощью кончика иглы-насадки или тонким зондом, что позволит снизить вероятность появления пузырей и улучшит заполнение углублений эмали. После нанесения герметика, выдержите 15÷20сек для затекания в глубину фиссуры, при необходимости удалите возникшие воздушные пузыри. Не допускайте затекания герметика на не протравленные участки эмали.

Внимание! После завершения нанесения герметика необходимо слегка оттянуть поршень шприца для снятия давления и предотвращения вытекания материала.

5. Отвердить герметик, используя источник света длиной волны 450÷500 нм с плотностью потока не ниже 600 мВт/см², световод должен быть максимально приближен к отверждаемому материалу, но не касаться его. Время отверждения герметика (прозрачного и непрозрачного) - 20 секунд.

После отверждения герметика необходимо протереть окклюзионную поверхность ватным тампоном. Качество герметизации проверить зондом. Проверить окклюзию и при необходимости провести коррекцию.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Материал-герметик «ФисСил С» содержит метакриловые мономеры. С осторожностью применять у пациентов, имеющих повышенную чувствительность к метакриловым мономерам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать материал – герметик «ФисСил С» в целях не предусмотренных данной инструкцией. Не допускайте попадания неотвержденного материала вовнутрь.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

При соблюдении инструкции побочных действий нет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование вариантов исполнения (в зависимости от комплектации):

«Материал-герметик для закрытия углублений и фиссур зубов светового отверждения «ФисСил С» расширенный набор:

- шприц с материалом герметиком для закрытия углублений и фиссур зубов светового отверждения «ФисСил С» прозрачный -1 шт.
-шприц с материалом-герметиком для закрытия углублений и фиссур зубов светового отверждения «ФисСил С» непрозрачный - 1шт.
-шприц с гелем для обработки зуба -1шт.
-игла-насадка - не более 40 шт.
-игла одноразовая для шприца геля - не более 5 шт.
-инструкция по применению - 1шт.
-групповая тара (коробка) - 1шт.

«Материал-герметик для закрытия углублений и фиссур зубов светового отверждения «ФисСил С» профессиональный набор:
-шприц с материалом- герметиком для закрытия углублений и фиссур зубов светового отверждения «ФисСил С» прозрачный -1шт.
-шприц с материалом-герметиком для закрытия углублений и фиссур зубов светового отверждения «ФисСил С» непрозрачный - 1шт.
-флакон с гелем для обработки зуба – 1шт.
-игла-насадка - не более 40 шт.
-ручка кисточки - 1шт.
-кисточки одноразовые - 20шт.
-инструкция по применению - 1шт.
-групповая тара (коробка) - 1шт.

«Материал-герметик для закрытия углублений и фиссур зубов светового отверждения «ФисСил С» базовый набор:
-шприц с материалом-герметиком для закрытия углублений и фиссур зубов светового отверждения «ФисСил С» прозрачный -1шт.
-шприц с материалом-герметиком для закрытия углублений и фиссур зубов светового отверждения «ФисСил С» непрозрачный - 1шт.
-игла-насадка - не более 20 шт.
-инструкция по применению -1шт.
-групповая тара (коробка) - 1шт.

«Материал-герметик для закрытия углублений и фиссур зубов светового отверждения «ФисСил С» шприц:
-шприц с материалом-герметиком для закрытия углублений и фиссур зубов светового отверждения «ФисСил С» прозрачный или непрозрачный -1шт.
-игла-насадка - не более 10 шт.
-инструкция по применению -1шт.
-групповая тара (коробка) -1шт.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Материал – герметик «ФисСил С» в упакованном виде транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующий вид транспорта.

Условия транспортирования по ГОСТ 15150-69 при температуре +(5÷24)°С.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Шприцы с материалом «ФисСил С» должны быть закрыты сразу после применения. Материал «ФисСил С» необходимо хранить при температуре +(5÷24)°С, в защищенном от воздействия солнечных лучей помещении.

При хранении в холодильнике материал «ФисСил С» перед использованием необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 1 часа.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие материала-герметика «ФисСил С» всем требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий транспортирования и хранения - 2 года.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и передвижных комплексах.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация материала-герметика «ФисСил С» и принадлежностей с истекшим сроком годности или пришедшем в негодность по каким-то иным причинам не требуют специальных мер предосторожности при уничтожении. Отходы относятся к классу опасности А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к твердым бытовым отходам) СанПин 2.1.7.2970.

Наименование и адрес предприятия-производителя/ организация принимающая претензии:

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология Дентистри» ООО «СТОМАДЕНТ», 140070, Россия, Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11, этаж 3, офис 301.

Телефон/факс: +7(495) 514-93-47/48; 514-93-46. E-mail: info@stomadent.ru, www.stomadent.ru